


Biomat filter™

הוראות שימוש


מגביר עוצמת שאיבה ומונע לחלוטין סתימות במערכת הסקשן

יש לחבר את המיכל לבסיס הפילטר ע"י חצי סיבוב כנגד כיוון השעון

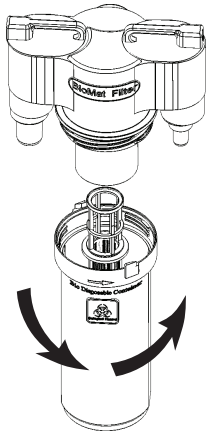


3

יש לחבר את הפילטר אל מיכל האגירה על ידי לחיצת תחתית הפילטר לתוך הפין שבמרכז המיכל

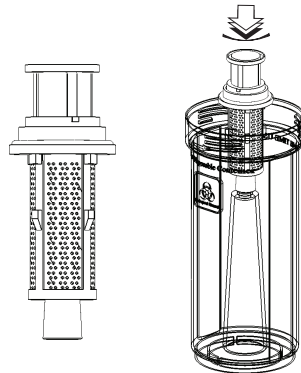


2

חשוב!!
לודא שאין פילטר בתוך הצינור * בשימוש עם ביו פילטר אין להכניס שום פילטר לתוך בית הפילטר האפור

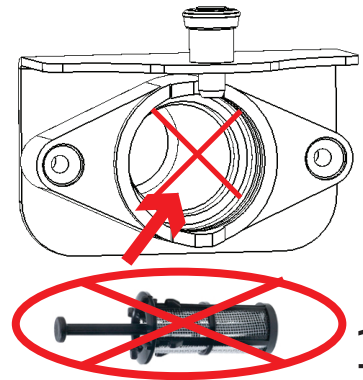

1

החלפת וניקוי הפילטר - יש לכבות את הסקשן (להשתמש בכפפות ומשקפי מגן) ובזמן שהפילטר מחובר למרקקה יש לסובב את מיכל חצי סיבוב ולנתקו כלפי מטה.

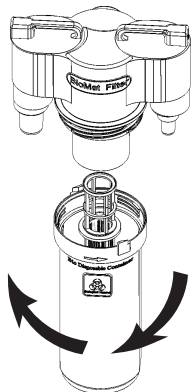


6

מדי שבוע או בעת רעש חריג יש לודא שכל הגומיות מחוברות ושלמות גומיה מס 1 עליונה לפקק גומיה מס 2 תחתונה לפקק




5

יש למשוך למעלה או להבריג החוצה את פין האבטחה ואז ניתן להכניס את הביומט פילטר אל המרקקה, יש לודא כי הפין האבטחה הוברג או ירד למטה לאחר החיבור

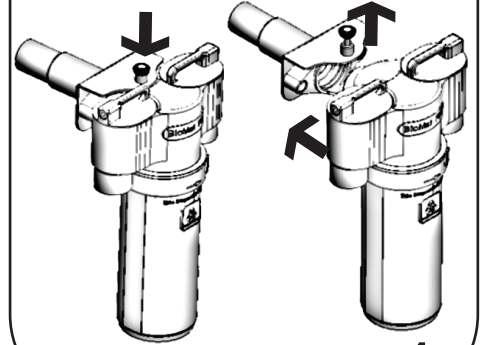


4

רצי פעם בשבוע יש לנתק את הפילטר מהמרקקה ולפרק את הפילטר לחלקיו ולנקותו בעזרת מים וסבון

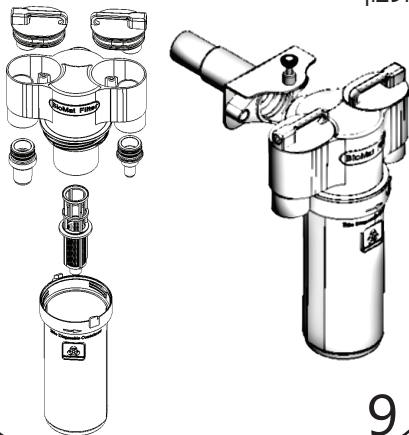


9

חיבור נייטרוס אם ברשותכם מערכת נייטרוס יש לחבר את יציאת הגזים אל הפילטר (פקק מיוחד לחיבור לנייטרוס)

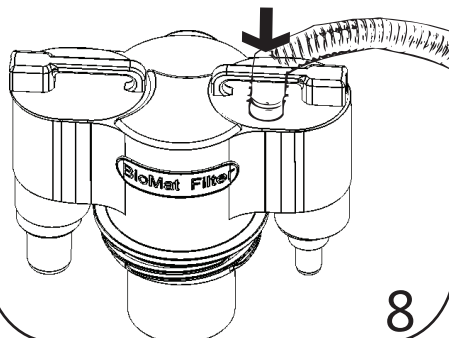

8

בזמן העברת המיכל לניקוי או לאיחסון יש לאטום את המיכל המלא בעזרת המכסה, ולחבר לבסיס הפילטר מיכל חדש עם פילטר חדש אלא הימנע מלהשאיר מיכל מלא ללא מכסה והקפד להשאירו במקום בטוח

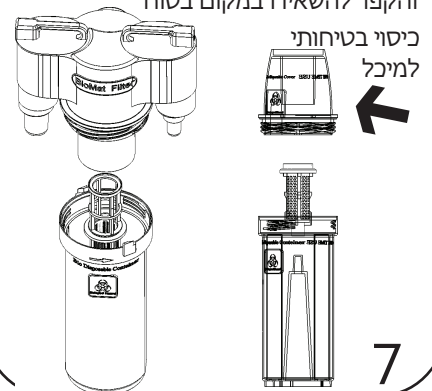

7

* יש לשאוב חומר חיטוי ולהשתמש בכפפות ומשקפי מגן בטרם פתיחת הפילטר

חשוב ביותר: בסוף יום עבודה או משמרת לנקות את הביו-פילטר ולהשתמש בטבליות חיטוי לשאוב 2 כוסות בכל צינור ולהשאיר את הסקשן פתוח עוד דקה נוספת



אתי תעשיות - רח' הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון ר"ג) טל 03-5799760
טלפון כלל-ארצי 1800-22-1205 / DENTAL@013.NET / WWW.ETI-DENTAL.CO.IL



תעשיות דנטליות בע"מ

מכירות, מפעל ותצוגה: רח' הקישון 16 בני-ברק
ליד קניון ר"ג (איילון) - ת.ד. 1400 בני ברק מיקוד 51114
טל. 03-5799760, 03-5799758 פקס. 03-5799758

אתי

Web site: www.eti-dental.co.il

E-mail: etidnt@eti-dental.com



אמינות, עיצוב, מחיר מתחרה, שרות בכל הארץ
ציוד פנאומטי המיוצר בארץ בשיטה ובטיב אמריקאי

הוראות שימוש מומלצות והסבר לטבליות **MAGNOLIA** גירסה 8\2016

טבליות תוצרת קאטאני איטליה חומר מחטא ונוגד קצף מומלץ למערכת סקשן

הניסיון של שנים בחומר הוכיח יעילות רבה בפתיחת סתימת קיימות, מניעת ריח רע במרפאה

וזאת ללא יצירת קצף שמגן על מערכת הסקשן והמנוע החשמלי!

אין לגעת בחומר ללא כפפות מגן! אין להשאיר את החומר חשוף למבקרים או לילדים!

לאחסן אותו במקום סגור במקום שמאחסנים חומרי חיטוי מסוכנים! תמיד להשאיר באריזה!

יש להשתמש בכפפות ולרחוץ היטב את הידיים לאחר מגע בגוף עם החומר!

דם, ריר וכל סוגי תחליפי חומרי החיטוי, בשילוב עם מערבולות הנוצרות ע"י הסקשן יוצרים הרבה

קצף, אשר יכול לגרום לעצירות פתאומיות תכופות ולא רצויות של סיר ההפרדה.

החומר בטבליות מונע הקצפה ומחטא את הצנרת ביוניט ואת הצינורות המובילים את הסקשן.

חשוב ביותר לאחר סיום העבודה להעביר בסקשן מים עם חומר חיטוי מומס במים חמים.

לפי הניסיון המוכח שלנו אנו מציעים להמיס אחת או בשתי טבליות בתוך מיכל של 3 ליטר מים

חמים. כל טבלייה עטופה בסרט מגן אשר נמס במים, אשר מבטיח שימור ושימוש בטוח לאורך זמן

אסור להסיר את הסרט המגן, הוא ימס במגע עם מים. שיטה אחרת להכניס טבליה לביו פילטר

יש לשאוב מים קצת חמים דרך טיפ הסקשן, כמובן לאחר שהוכנסה הטבליה לפילטר הסקשן,

היא נמסה באיטיות פעולה זו מספיקה בכדי להשיג אפקט נוגד קצף מידי.

חתיכות שנדבקו יכולות להיות מוסרות מהפילטר ע"י שטיפה במים חמים.

הטבלייה כוללת בתוכה חומרים אנטיבקטריים שמפרקים את החומרים שהינם מקור לריח רע.

במקרה של סתימה לשאוב מים חמים וטבליה ללא פילטר ולאחר השאיבה להשאיר את הסקשן

עובד **במקסימום שאיבה לכמה דקות** רצוי ללא מכסה הפילטר או ללא הביו-פילטר הלבן

חשוב לדעת אם בבוקר הסקשן לא שואב הסיבה בדרך כלל חוסר ניקוי בגמר העבודה ביום הקודם