



* נא להשתמש בכפפות וציוד מגן!!
לפתוח את המרקה מהצד שקרוב לכסא
ולמצוא את הפילטר הצהוב

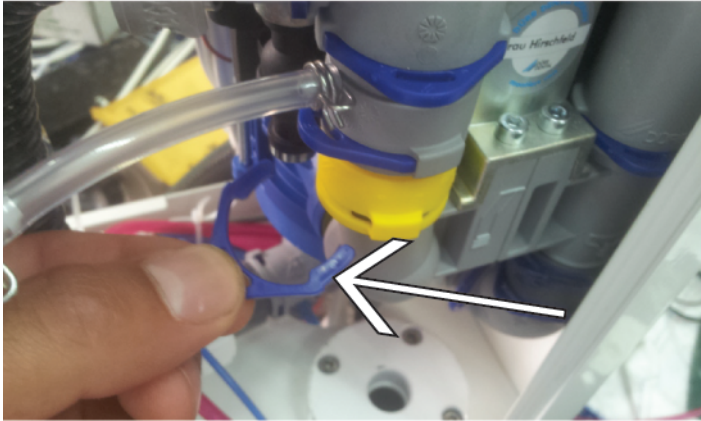

למשוך את פרסת הפלסטיק הכחולה בתחתית החלק הצהוב
(ניתן להשתמש בצבת)

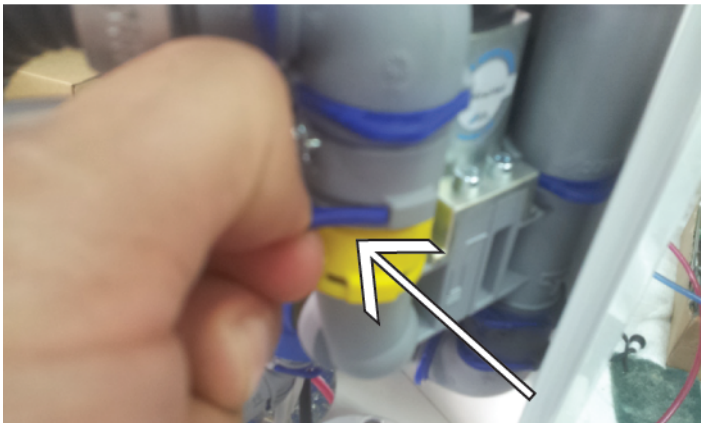

למשוך את פרסת הפלסטיק הכחולה שמעל החלק הצהוב
(ניתן להשתמש בצבת)



למשוך את הצינור האפור כלפי מעלה
לניתוק מהפילטר הצהוב



למשוך את הפילטר הצהוב החוצה לנקות ולהחזיר הכל