

טיפול במערכות סקשן המכילות סירי הפרדה תוצרת DURR

כמחצית ממערכות הסקשן אינן פועלות כשורה הסיבה לכך שמספר גדול של מערכות הסקשן עוברים חיטוי ללא מתן דגש לניקיון כנדרש הניקיון של מערכות הסקשן נדרש ואף אלמנטרי, בהתחשב בכך שהמערכת שואבת חומרים אגרסיביים כגון: דם, סילביה, חלקי שיניים, אבקות למינהם וכדומה, כאשר החומרים אלו מצטברים בצנרת הסקשן ונבנים אט אט בתוך הצנרת וסותמים אותה בהדרגה וכתוצאה מכך פוגעים בביצועי הסקשן כאשר במצב הגרוע ישנן הפסקות שאיבה.

שימוש מוקפד בחומרי ניקוי וחיטוי יגנו על מערכת הסקשן שלך (כולל צנרת) מהצטברות משקעים וזיהום מיקרוביאלי. ניקיון סדיר של מערכת הסקשן תמנע אובדן ביצועים של המערכת ותגדיל את תוחלת החיים של מערכת הסקשן שלך.

טבליות חיטוי ונגדות קצף CATTANI

דם, ריר וכל סוגי תחליפי חומרי החיטוי, בשילוב עם מערבולות הנוצרות ע"י הסקשן יוצרים הרבה קצף, אשר יכול לגרום לעצירות פתאומיות לא רצויות של סירי הפרדה. החומר בטבליות מונע הקצפה ומחסא את הצנרת. חשוב ביותר לאחר סיום העבודה להעביר בסקשן מיד מים נקיים לאחר מכן, לשאוב מים עם חומר חיטוי וכן לפני הפסקת צהריים, , אנו מציעים להכניס חצי טבליה אל הפילטר המפצל, ואת החצי השני להכניס אל הפילטר הקו (הצהוב) של DURR כל טבלייה עטופה בסרט מגן אשר נמס במים, אשר מבטיח שימור ושימוש בטוח. לא צריך להסירו הוא ימס במגע עם מים. יש לשאוב כמות קטנה של מים דרך טיפ הסקשן, כמובן לאחר שהוכנסה הטבלית לפילטר הסקשן, פעולה זו מספיקה בכדי להשיג אפקט נוגד קצף מיידי. הטבלייה נמסה באיטיות כאשר נשטפת במים, ותשחרר חומרים נוגדי קצף לכל יום העבודה, חתיכות שנדבקו יכולות להיות מוסרות מהפילטר ע"י שטיפה במים חמים. הטבלייה כוללת בתוכה חומרים אנטיביוטיים שמפרקים את החומרים שהינם מקור לריח רע

*** כאפשרות נוספת לשימוש בטבליות, מומלץ להמיס טבליה או שתיים בתוך כלי ייעודי לשאוב את החומר באמצעות כלי שאיבה (ראה תמונה 2 בגב הדף)**

ניתן להזמין טבליות חיטוי וניקוי באתי תעשיות בפקס 03-5799758

DURR Orotol® Plus

חשוב! אם הנך משתמש באורטול חובה עליך להשתמש לפחות פעם בשבוע בחומר MD 555 חומר זה מיועד להמיס את שאריות הדם והליכלוך בצנרת ולשמש כנוגד הקצפה



DURR Orotol® Plus

נוזל ניקוי וחיטוי נוגד קצף המיועד לחיטוי, בישום, ניקוי וטיפול סימולטני של כל מערכת הסקשן * מיועד למערכות סקשן, מומלץ ע"י היצרנים המובילים לטיפול ב:

* חיידקים (כולל שחפת)

* פטרת

* וירוס (כולל HBV, HCV, HIV)

* רכיבים פעילים: QAC

2.5 ליטר בקבוק

DURR MD 555 Cleaner

* יעילות גבוהה בניקיון אבקת פרופי

* טיפול מושלם בשילוב עם Orotol® Plus

או Orotol® אולטרה®

* הרכב אפקטיבי של חומצות אורגניות

ונוגדי הקצפה.

Orotol® Plus ו-MD 555 Cleaner מיועדים לעבודה משולבת


לשאלות

חיטוי וניקוי של מערכת הסקשן

1. ניקיון לאחר כל מטופל.

לאחר כל טיפול שאב כוס מים קרים עם צינור הסקשן הגדול, שאב כוס מים קרים נוספת עם צינור הסקשן הקטן. יש להקפיד על כך גם אם בטיפול נעשה שימוש רק באחד הצינורות


* צינור הסקשן הגדול שואב כמות גדולה של אוויר המשפרת משמעותית את פעולת הניקיון

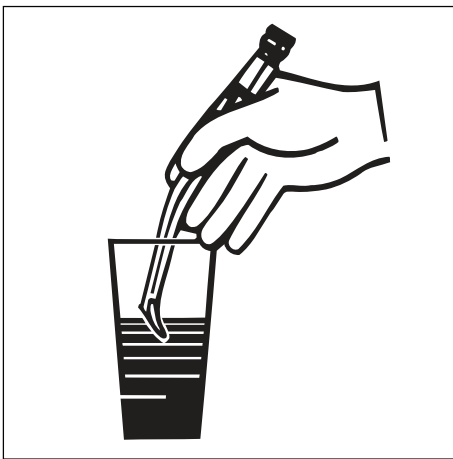

2. ניקיון בכל הפסקת צהריים וכל סוף יום העבודה

לפני כל הפסקת צהריים ובסוף כל יום עבודה יש לנקות ולחטא את מערכת הסקשן באמצעות חומר ניקוי וחיטוי לא אגרסיבי, יש להשתמש במתקן שאיבה שבתמונה

* אין להכין את תערובת החיטוי יותר מאשר שעה אחת לפני השימוש, המתנה של זמן ארוך יותר תגרום לאובדן הדרגתי של עוצמת החיטוי
* אין להשתמש בכל חומר ניקוי או חיטוי אשר לא אושר במפורש ע"י אתי תעשיות דנטליות בע"מ, למשל, מאושר השימוש ב: טבליות CATTANI Orotol Plus או Orotol Ultra בצירוף עם MD 555
* אסור להשתמש בחומרי ניקוי או חיטוי היוצרים קצף
* בשום אופן אסור להשתמש / לשאוב / לשפוך לכיור חומצות כגון: אצטון ואקונומיקה וכד' מאחר והחומרים אלו מפרקים את חלקי הפלסטיק והגומיות.

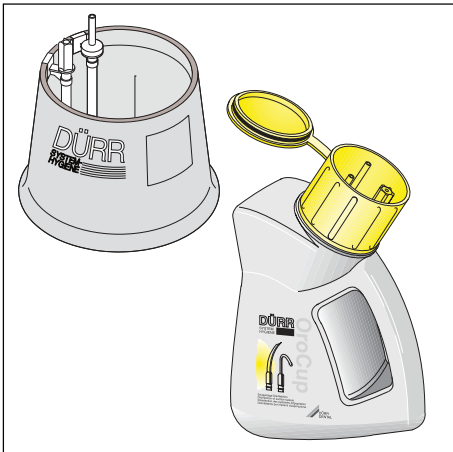


3. ניקיון פילטרים בסיום יום עבודה

בסיום יום עבודה יש לנקות את הפילטר הצהוב (מס' 1 באיור) בסיום יום עבודה יש לנקות את הפילטר השחור (מס' 2 באיור)

* במידת הצורך יש להחליף את הפילטרים

* בדגמים בהם מותקן סיר הפרדה תוצרת METASYS יש לנקות את מיכל האיטוף הממוקם בגוף המרקקה מתחת למפצל הסקשן (מס' 3 באיור)

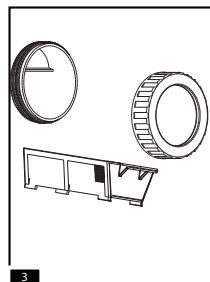

4. ניקיון הסיפון


פעם בשבוע יש לנקות את הסיפון הממוקם מתחת לגוף המרקקה לפני הסגירה יש למרוח זולין על הגומיה לאטימה הרמטית.



5. ניקיון פילטר פנימי של סיר ההפרדה

בכל שבוע יש לנקות את הפילטר הצהוב הפנימי (מצוי על סיר ההפרדה CS1) יש לאתר את הפילטר (חלק צהוב המחובר לגוף סיר ההפרדה) משוך החוצה את הפרסות הנעילה (בצבע כחול) נתק את הפילטר ולנקות היטב לאחר חבר הכל בחזרה ולא לשכוח להחזיר למקום את פרסות הנעילה הכחולות

* במידת הצורך יש להעזר בטכנאי

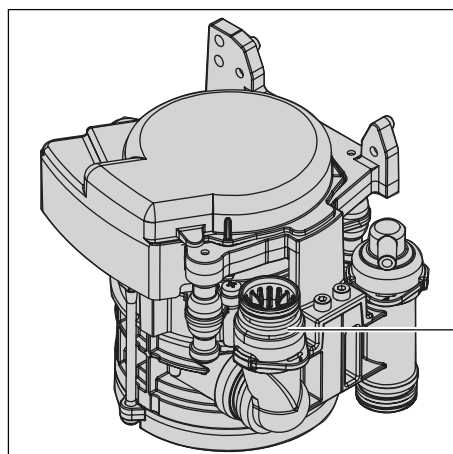

4