


הוראות שימוש

⚠ אזהרות


- בטרים ביצוע כל פעולה בכלי-היד יש להצטייד בכפפות ומשקפי הגנה לעיניים.
- לפני השימוש בכלי-היד על מטופל, יש להפעיל את כלי-היד ולוודא את שהכלי-היד תקין.
- אם כלי-היד משמיע רעשים חריגים, רועד, רוטט או מתחמם באופן חריג - אין להשתמש בו.
- אם בזמן העבודה מתגלה תפקוד חריג כלשהו של כלי-היד - יש להפסיק מיד את העבודה.
- יש להחליף מקדח רק בעצירה מוחלטת של כלי-היד, אין ללחוץ על לחצן שחרור המקדח בכדי לעצור את סיבוב המקדח.
- אין לפרק, לתקן או להחליף חלקים לכלי-היד, אלא רק במעבדת התיקון של ETI
- יש להקפיד שכלי-היד לא יפלו או יחבטו.

הוראות שימוש

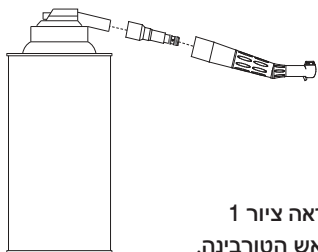


1. נתק את הטורבינה מהחיבור המהיר.
2. נקה וחסא את הטורבינה בעזרת מטלית וחומר חיטוי.
3. חבר פייה מתאימה לספריי השמן.
4. נער את בקבוק השמן לפני השימוש
5. החדר את הפייה לתוך חלקה האחורי של הטורבינה - ראה ציור 1
6. שמן את הטורבינה למשך 3 שניות עד ליציאת שמן מראש הטורבינה.
7. פעם בשבוע חשוב לשמן את התפסנית למשך 2 שניות - ראה ציור 2
8. פעם בשבוע יש לפרק את החיבור המהיר מהיוניט לצורך ניקוי וחיטוי.
9. לאחר השימוש ולפני הסיטרול, חשוב לחבר את הטורבינה ליוניט ולהפעילה למשך 20 שניות לפיזור השמן.
10. כעת ניתן להכניס את הטורבינה לשקית סיטרול, ולהכניס לאוטוקלאב לעד 135 מעלות למשך 20 דק'.

ציור 1

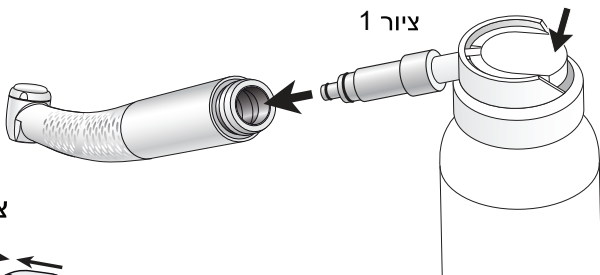

ציור 2

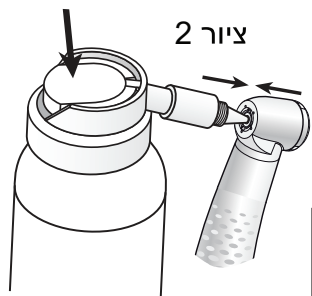

חשוב לדעת


במידה והנך משתמש/ת בדואר
לשליחת כלי יד לתיקון במעבדת ETI
יש חובה על שימוש במעטפה מרופדת

אתי תעשיות דנטליות בע"מ | רח' הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון ר"ג)
טל 03-5799760 | DENTAL@013.NET | WWW.ETI-DENTAL.CO.IL

הוראות שימוש

1. לפני תחילת העבודה יש לוודא שהחיבור מהיר מחובר ומהודק היטב לצינור היוניט

* אם יש צורך טכנאי יכול להדק באמצעות כלי מיוחד

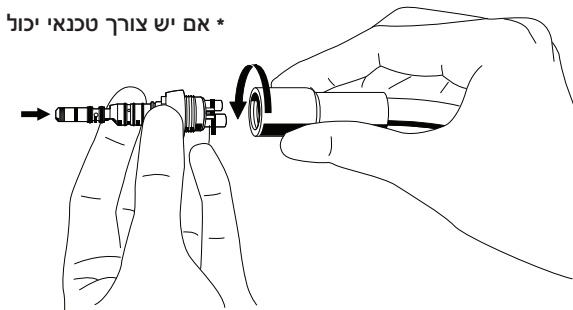


2. לאחר שהחיבור מהיר מחובר היטב לצינור, ניתן לחבר את הטורבינה בלחיצה קלה לחיבור מהיר



פתרון בעיות:

1. אם יש נזילת מים כתוצאה מהשימוש בכלי-היד - אנא ודאו כי קיים לחיבור המהיר כל הגומיות (O-RING)

5 גומיות באף החיבור מהיר

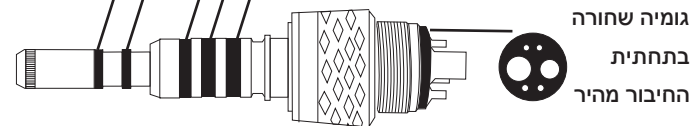

גומיה שחורה
בתחתית
החיבור מהיר

2. אם האור לא עובד בהפעלה ראשונה, יש להוציא את הנורה מהחיבור מהיר, ולהפוך את הנורה (לסובב 180 מעלות)



לפתוח את המכסה
כדי להגיע לנורה
לסובב את הנורה

אתי תעשיות דנטליות בע"מ | רח' הקישון 16 בני-ברק (ליד קניון ר"ג)
טל 03-5799760 | DENTAL@013.NET | WWW.ETI-DENTAL.CO.IL