

אתי תעשיות דנטליות

טל: 03-5799760

פקס: 03-5799758

חיטוי מערכת הסקשן



חיטוי הסקשן עם GREEN&CLEAN M2

- פעמיים ביום ואחרי טיפול כירורגי
- בנוסף לחיטוי, יש לשאוב כוס מים בסיום כל טיפול
- החלף צבע (ירוק / אדום) כל 80 חיטויים (בסיום השקית)
- השתמש בכפפות בזמן החיטוי
- עקוב בזהירות אחר ההוראות

METASYS

GREEN & CLEAN M2

חומר חיטוי למערכת שאיבה ידידותי לחומרים
(כולל מרקקה, מפריד אמלגם, וסיר הפרדה)

מערכת כפולה (אדום / ירוק) נגד התנגדות מיקרוביולוגית

קוטל חיידקים כולל: TB., fungicide, HBV/HIV/HCV

ריכוז גבוהה קל למינון

מפיג ריחות מעולה ויכולת המסת חלבונים

אנטי הקצפה אקיטבי


DGHM/VAH-listed, CE 0408




1
לחץ על המשאבה
פעמיים X2
(6ml של תמיסה)



2
מלא את המיכל
במים קרים בלבד עד הסימן
(600ml עם 1% של תמיסה)

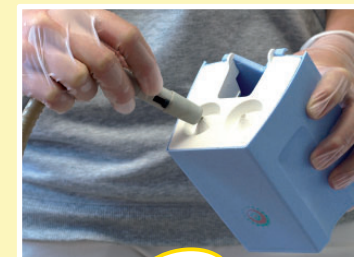

3
החזק את פיית הסקשן
הקטנה על פתח מס' 1
עד שנשאב אוויר (200ml)

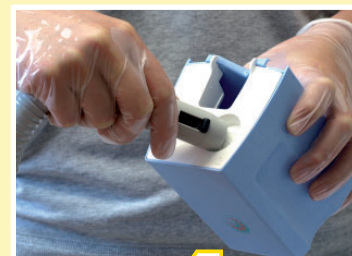

4
החזק את פיית הסקשן
הגדולה על פתח מס' 2
עד שנשאב אוויר (200ml)



5
רוקן את שארית
התמיסה אל כיוור
המרקקה (200ml)

בכדי למנוע ריאקציה כימית

אנא לא להשתמש בחומרי חיטוי אחרים בתקופת השימוש במוצר