



# תעשיות דנטליות בע"מ

מכירות, מפעל ותצוגה: רח' הקישון 16 בני-ברק  
ליד קניון ר"ג (איילון) - ת.ד. 1400 בני ברק מיקוד 51114  
טל. 03-5799760, 03-5799758, פקס. 03-5799758

# אתי

Web site: [www.eti-dental.co.il](http://www.eti-dental.co.il)  
E-mail: [etident@eti-dental.com](mailto:etident@eti-dental.com)



אמינות, עיצוב, מחיר מתחרה, שרות בכל הארץ  
ציוד פנאומטי המיוצר בארץ בשיטה ובטיב אמריקאי

29 אפריל 2015  
י' אייר תשע"ה

## הוראות להפעלה ותכנות כסא טיפול TECNODENT ECO NEXT

1. להפעלת הכסא יש להעביר את המפסק שמצוי בבסיס הכסא למצב ON.




2. הפעלת כסא הטיפול בעזרת פיקודי הרגל

הרמת בסיס הכסא		מצב "0"
תוכנית טיפול 1		שליחת מטופל לשטיפה, לחיצה נוספת - חזרה למצב אחרון
תוכנית טיפול 2		תוכנית טיפול 3
השכבת גב הכסא		הרמת גב הכסא
		הנמכת בסיס הכסא

3. התוכניות הבאות ניתנות לתכנות:

- (1) מצב "0"
- (2) תוכנית טיפול 1
- (3) תוכנית טיפול 2
- (4) תוכנית טיפול 3

על מנת לתכנת את הכסא יש ללחוץ על כפתור ה-  הממוקם בחלקו האחורי של הכסא מתחת למשענת הגב.



לתכנות הכסא יש להביא את הכסא לפוזיציה הרצויה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור ה-M, ובעוד כך יש ללחוץ לחיצה רגעית על אחת מהתוכניות (מנויות בסעיף 3) לאחר שנשמע צפוף התכנות הסתיים.