


הוראות שימון לכלי יד ETI

הוראות שימון

- * יש להגן על העיניים עם משקפי מגן.
- * בזמן השימון יש לעטוף את אזור השימון במטלית, שלא יתיז שמן לעיניים
- 1. נקה וחטא את כלי היד בעזרת מטלית וחומר חיטוי.
- 2. חבר פייה מתאימה לספריי השמן.
- 3. נער את בקבוק השמן לפני השימוש
- 4. מצא את כניסת האוויר לכלי היד - העזר בציורים בעמוד זה
- 5. שמן את כלי היד בכניסת האוויר למשך 3 שניות - בזמן השימון אחוז את כלי היד היטב במקומו
- 6. פעם בשבוע חשוב לשמן את תפסנית הטורבינה למשך 2 שניות - ראה ציור 3
- 7. לאחר השימון ולפני הסיטרול, חשוב לחבר את כלי היד ליוניט ולהפעילה למשך 20 שניות לפיזור השמן.
- 8. כעת ניתן להכניס את כלי היד לשקית סיטרול, ולהכניס לאוטוקלאב לעד 135 מעלות למשך 20 דק'.

כלי יד בחיבור ישיר לצינור - ללא חיבור מהיר - (טורבינות / מנועים)

- 1. יש לחבר משמנת (מתאם) לספריי השמן * קצה שפיצי

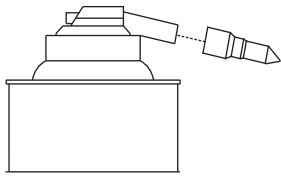


כניסת אוויר לטורבינה
יש לשמן בחור זה בלבד




החור הקטן מבין שני הגדולים

- פעם בשבוע רצוי לשמן את ראש הטורבינה ולנקות בעזרת מברשת עדינה

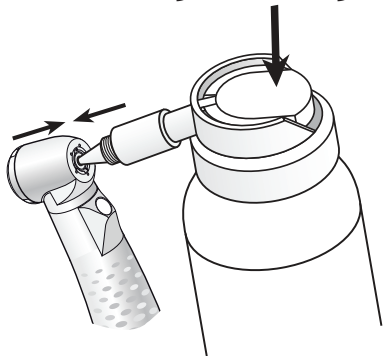


- לשמן את כלי היד (טורבינה/מנוע) למשך 3 שניות * יש להחזיק את כלי היד היטב במקומו

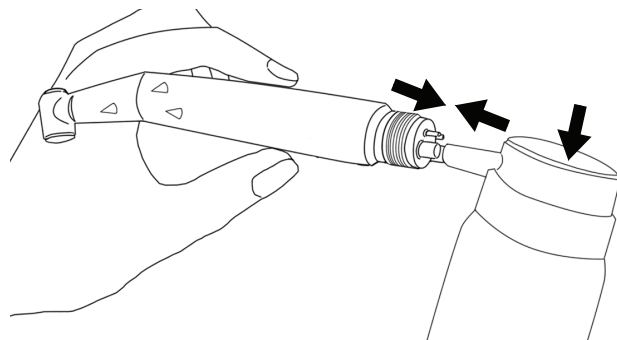


כלי יד בחיבור מהיר - (טורבינות / ידיתנים / זוויתנים)


- יש להשתמש במשמנת (מתאם) יעודי לכלי היד

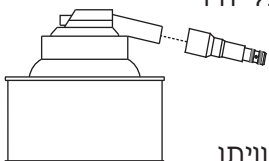

שימון ידיתן / זוויתן

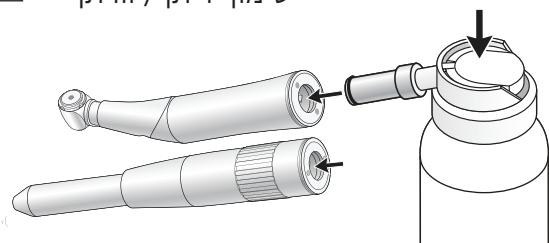

שימון טורבינה

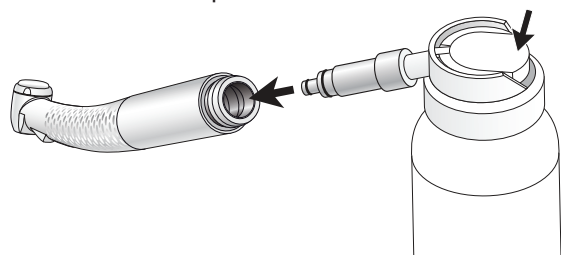

- כלי יד המתחברים בעזרת חיבור מהיר ליוניט יש לשמן ישירות לגוף בעזרת משמנת (מתאם) ייעודי